

## Präanalytik

Untersuchungsangebot	Vorbereitung Patient	Anforderungsschein	Patienteninformationen	Art und Menge des Untersuchungsmaterials	Entnahme/Lagerung/Transport	Entnahmegefäß	Versandart/-dauer	Nachforderungen
Immunphänotypisierung Durchflusszytometrie von Leukämie- und Lymphomzellen	PB keine oder SOP KMP	Spezielle Hämatologie 62.1	siehe Anforderungs- schein	PB/KM 5ml	KM-Punktion/ Raumtemperatur Hol-/ Bringediens/ Rohrpost 1451	EDTA- Röhrchen 7 ml	Plastiktüten, braune Tüten/ 4h	1 Werktag nach Entnahme
Lymphozyten- subpopulation Zellulärer Immunstatus	keine	Spezielle Hämatologie 62.1	siehe Anforderungs- schein	PB 2,7ml	venös/ Raumtemp./ Hol-/ Bringediens/ Rohrpost 1451	EDTA- Röhrchen 2,7 ml	Plastiktüten, braune Tüten/ 4h	1 Werktag nach Entnahme
Manuelles Differenzialblutbild (in Ausnahmefällen)  Anforderungen laufen mittels X-Serv über das Zentrallabor	keine	Spezielle Hämatologie 62.1  X-Serv Zentrallabor, manuelles DIFF	siehe Anforderungs- schein	PB 2,7ml	venös/ Raumtemp./ Hol-/ Bringediens/ Rohrpost 1451	EDTA- Röhrchen 2,7 ml	Plastiktüten, braune Tüten/ 4h	1 Werktag nach Entnahme
Blutbild bestimmung	keine	Kein Schein		PB mind. 50µl	kapillare Entnahme vor Ort oder venös/ Raumtemp.	kapilläre Entnahme oder EDTA- Röhrchen 2,7 ml	Plastiktüten, braune Tüten/ 4h	1 Werktag nach Entnahme

## Präanalytik

Untersuchungsangebot	Vorbereitung Patient	Anforderungsschein	Patienteninformationen	Art und Menge des Untersuchungsmaterials	Entnahme/Lagerung/Transport	Entnahmegefäß	Versandart/-dauer	Nachforderungen
Knochenmark-zytologie intern	SOP KMP	Anforderung und Befundung im digitalen ORBIS System	Siehe Onlineformular	KM 3ml	KM-Punktion// Raumtemperatur Hol-/ Bringediens/ Rohrpost 1451	EDTA- Röhrchen 7 ml	Plastiktüten, braune Tüten/ 4h	1 Werktag nach Entnahme
Liquordiagnostik	SOP Lumbalpunktion	Anforderung und Befundung im digitalen ORBIS System	Siehe Onlineformular	Liquor 2ml	Lumbalpunktion/ gekühlt/ Hol-/ Bringediens/ Rohrpost 1451	Abnahme in sterile Röhrchen	Plastiktüten, braune Tüten/ 4h	1 Werktag nach Entnahme
Pleura, Ascites, BAL..	SOP Punktion	Anforderung und Befundung im digitalen ORBIS System	Siehe Onlineformular	2ml	Punktion/ gekühlt/ Hol-/ Bringediens/ Rohrpost 1451	Abnahme in sterile Röhrchen	Plastiktüten, braune Tüten/ 4h	1 Werktag nach Entnahme

Untersuchungen mit dem gleichen Anforderungsschein bzw. die Anforderungen im ORBIS System sind farblich zusammengefasst Auf unserer Homepage finden Sie alle relevanten Anforderungsscheine bzw. Formulare.

Bitte füllen Sie die Pflichtfelder sorgfältig aus. Vergessen Sie nicht die Fragestellung bzw. Diagnose anzugeben.

Bei infektiösen Materialien bitte das Röhrchen und den Anforderungsschein mit dem Infektiösaufkleber versehen.

Ihr Team der Speziellen Hämatologie